

# Octilia

## SALVIETTE



### 20 GARZE STERILI MONOUSO PER L'IGIENE PERIOCLARE DELL'ADULTO E DEL BAMBINO

#### INDICAZIONI:

**Octilia Salviette** è indicato per l'igiene delle palpebre, delle ciglia sia nell'adulto che nel bambino anche in presenza di secrezioni conseguenti a fenomeni allergici, infiammatori e/o infettivi, quali blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura. Il suo utilizzo risulta particolarmente valido anche nella fase pre e/o post-operatoria degli interventi di chirurgia oftalmica.

**Octilia Salviette** è inoltre consigliato per l'igiene quotidiana della zona periculare in soggetti predisposti all'insorgenza di blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura.

**Octilia Salviette** per la sua peculiare composizione **consente l'utilizzo anche da parte dei portatori di lenti a contatto.**

#### PROPRIETÀ:

Tutti i componenti di **Octilia Salviette** risultano utili per ottenere una ottimale attività detergente ed emolliente nel pieno rispetto della particolare fisiologia della zona periculare, particolarmente delicata e sensibile.

Il prodotto ha un'ottimale compatibilità chimico fisica con il film lacrimale; per il suo pH equilibrato non lascia residui ed è in grado di operare una detersione accurata rimuovendo le secrezioni, eventuali corpi estranei, polvere, ecc.

#### COMPOSIZIONE:

Garza di cotone 100%, imbevuta di 2,8 ml della seguente soluzione: Aqua, Phenethyl alcohol, Sodium chloride, Ammonium glycyrrhizate, Sodium cocoyl wheat amino acids, PEG-40 hydrogenated castor oil, Tamarindus indica fruit extract, PEG-40 castor oil, Polysorbate 20, Sodium bicarbonate, Maltodextrin, Ethylhexylglycerin,

Aroma, Sodium hyaluronate.

#### MODALITÀ D'USO:

Dopo aver pulito accuratamente le mani aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale passandola delicatamente in modo da permettere un'adeguata detersione, un'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.).

Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40 °C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiando la zona delicatamente.

Nel caso, invece, di flogosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo.

#### AVVERTENZE:

La sterilità del prodotto è garantita solo se la busta è integra. La garza è monouso, il riutilizzo potrebbe essere veicolo di infezioni. Non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Monouso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Rev.0 del 26.07.2016

**Distributore: Bouty S.p.A** Via Vanvitelli, 4 - 20129 Milano  
info.consumatori@bouty.it



**FASTMEDITALIA SRL**

Sede Legale: Via Fiume 25, 20832 Desio (MB)

Sede Operativa: Via G. Verdi 16/B, 21020 Mornago (VA)